


7535 TSM Kniebandage „Carthago“ für Hunde

Indikation: Patellaluxuation
Kreuzbandriss
Arthrose

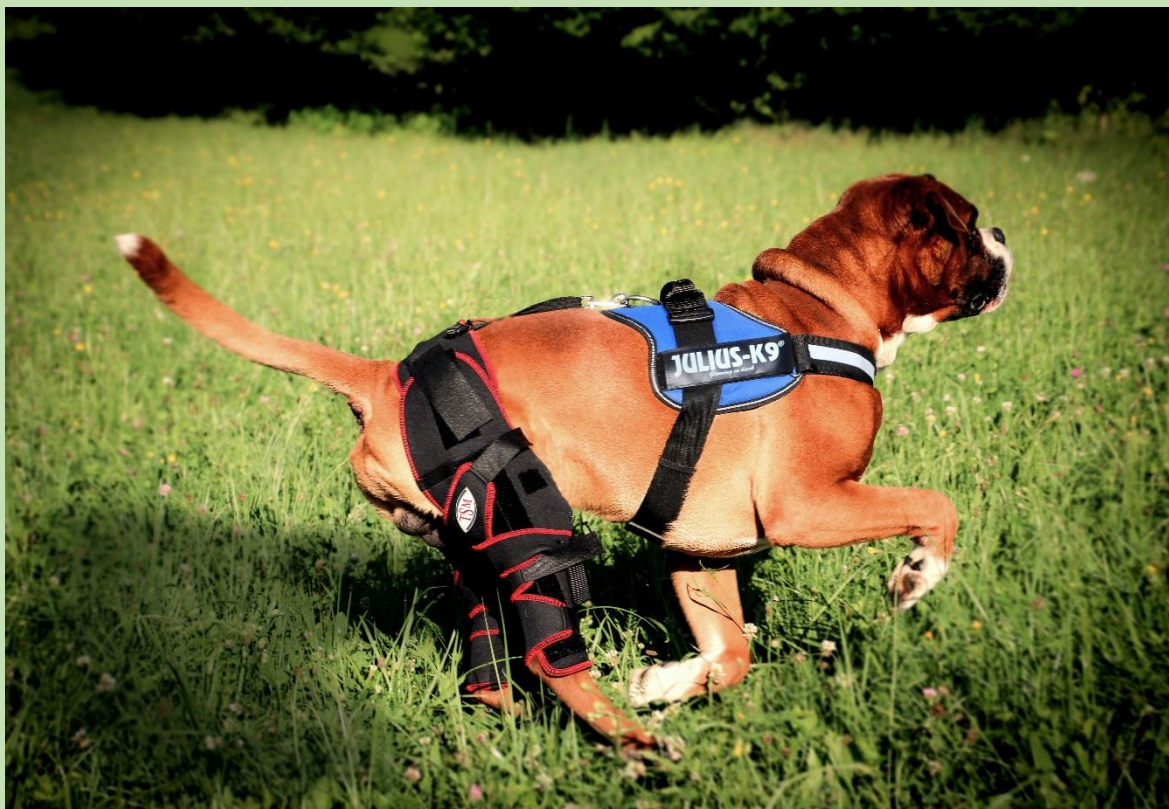

Maxl mit der TSM Kniebandage „Carthago“

Eigenschaften:

- dreiteilige Bandage aus 2 Knieteilen (5mm Neopren) und einem Rückenteil (3mm Neopren) zur individuellen Anpassung
 - es werden immer beide Knieteile zur gleichmäßigen Belastung der Hinterläufe angezogen,
 - das anatomisch angepasste Rückenteil verhindert Einschnürungen im Beckenbereich und verhindert das Abrutschen der Bandage im Kniebereich
 - Carthago wird mittels eines Haken noch zusätzlich an einem Hundegeschirr fixiert
- ab der Größe „S“ sind spezielle Flachfedern zur verstärkten Stabilisierung eingearbeitet
- das Rückenteil wird durch einen doppelten Flausch-Haft-Verschluss mit den Knieteilen verbunden, um die hohen Kräfte während der Bewegung aufzunehmen
- es entstehen keine Einschränkungen in der Bewegung

Geeignet für: täglicher Gebrauch in allen Lebenslagen

Hinweis: Zur schnelleren Gewöhnung des Hundes an das neue und ungewohnte Gefühl der Bandage, empfehlen wir, ihn mit Spielen oder Sonstigem für die ersten Minuten abzulenken. Danach wird die Bandage anstandslos getragen.



....weil wir Tiere lieben


Maße und Messpunkte:

Größe	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
L1 ¹	9,5	12	16,5	20,5	28	30	32
U2	10 – 17	14 – 19	16 – 26	21 – 30	22 – 32	29 – 40	40 – 53
U3	4 – 8	4 – 10	6 – 11	9 – 15	10 – 16	13 – 18	15 – 24
L4 ²		18 – 30		22 – 31	29 – 52		42 – 56

Maße für die Größenbestimmung in cm

¹ Mindestmaß für die Anwendbarkeit der Bandagengröße. Die Länge vom Sprunggelenk bis zum Messpunkt U2 am Oberschenkel des Hundes darf das Maß in der Größentabelle nicht unterschreiten

² Ist der Messwert größer oder kleiner als in der Tabelle angegeben, sollte das Rückenteil der nächsten Größe verwendet werden.

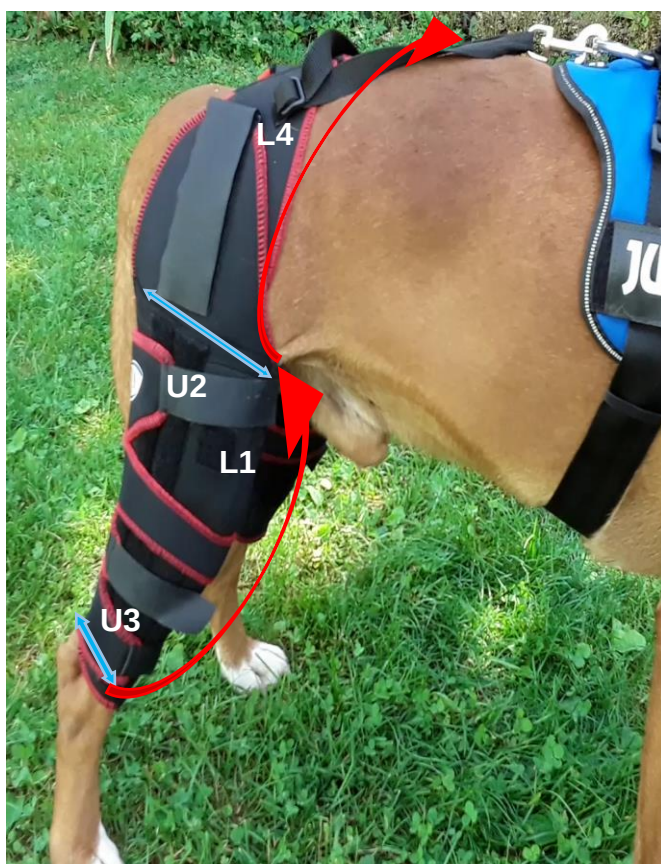

Lage der Messpunkte zur Größenbestimmung der Kniebandage

	L1	Länge vorn am Bein anliegend gemessen
	U2	Umfang Oberschenkel möglichst hoch gemessen
	U3	Umfang engste Stelle oberhalb des Sprunggelenks
	L4	Rückenteil von U2 über den Rücken zum gegenüberliegenden U2-Maß

Weitere Hundebandagen von TSM



7501 Vorderbeinbandage



Reha-Bandage Vorderbein
7520 ohne Schiene
7521 mit Schiene



Reha-Bandage Hinterbein
7530 ohne Schiene
7531 mit Schiene



7540 Gewichts-Bandage Vorderbein/Hinterbein

TSM vet-Reha Polsterbandagen Pferd 7265 li./ 7266 re. Vorderfußwurzelgelenk

Indikation: zum **Schutz vor Verletzungen bei einem Sturz/ Stoß** am Karpalgelenk z.B. bei Narkolepsie oder REM-Schlafmangel oder ähnliches

Eigenschaften:

- sehr gute anatomische Passform
- 10mm starkes Neoprenpolster über dem Karpalgelenk
 - hohe Rückstellkraft
 - progressiv wirkende Dämpfung
- Dehnungszone über dem Gelenk aus 2mm starkem, teflonbeschichteten Neopren

Geeignet für: Paddock und Laufstall

Maße und Messpunkte:

KP	XS	S	M	L
26 – 30	26 – 30	30 – 34	34 – 38	38 – 42

Bei **7265/66**: Messpunkt über der Mitte Vorderfußwurzelgelenk in cm

KP und XS unterscheiden sich in der Höhe der Bandage KP= Kleinpferd



Polsterbandage 7265
Die Narkolepsiebandage 7263: Die 7265 mit der Zusatzbandage 7267



Innenansicht Polsterbandage Vorderfußwurzelgelenk

7267 li./ 7268 re. Zusatzbandage für den Fesselkopf

Indikation: zum **Schutz vor Verletzungen bei einem Sturz/ Stoß** am Fesselkopf z.B. bei Narkolepsie oder REM-Schlafmangel oder ähnliches

Eigenschaften: 10mm starkes Neoprenpolster über dem Fesselkopf

- hohe Rückstellkraft
- progressiv wirkende Dämpfung

Hinweis: Die Zusatzbandage sollte in Verbindung mit der 7265/66 verwendet werden, da innenseitig Klettunkte angebracht sind, um beide Bandagen zu verbinden. Diese Punkte können Verletzungen hervorrufen, können aber bei Einzelverwendung mit einem Flauschband abgedeckt werden.

Bestellnummer im Set: 7263 li./ 7264 re.



Zusatzbandage 7267 li./ 7268 re. für den Fesselkopf

Maße und Messpunkte:

KP	XS	S	M	L
26 – 30	26 – 30	30 – 34	34 – 38	38 – 42

Bei **7267/68**: Messpunkt über der Mitte Fesselkopf in cm

KP und XS unterscheiden sich in der Höhe der Bandage KP= Kleinpferd

TSM vet-Reha Polsterbandagen Pferd 7275 li./ 7276 re. Sprunggelenk

Indikation: zum **Schutz vor Verletzungen bei einem Sturz/ Stoß** am Sprunggelenk z.B. bei Narkolepsie oder REM-Schlafmangel oder ähnliches

Eigenschaften:

- sehr gute anatomische Passform
- 10mm starkes Neoprenpolster über dem Karpalgelenk
 - hohe Rückstellkraft
 - progressiv wirkende Dämpfung
- Dehnungszone über dem Gelenk aus 2mm starkem, teflonbeschichteten Neopren

Geeignet für: Paddock und Laufstall

Maße und Messpunkte:

KP	XS	S	M	L
37 – 41	37 – 41	41 – 45	45 – 49	49 – 53

Bei **7275/ 76**: Messpunkt über der Mitte Sprunggelenk in cm

KP und XS unterscheiden sich in der Höhe der Bandage KP= Kleinpferd



Polsterbandage 7276



Innenansicht Polsterbandage Sprunggelenk

Weitere TSM vet-Reha Pferdebandagen



Fesselkopfbandage mit Gurtung (PR)
7150 vorne
7160 hinten



Sprunggelenkbandage
7321 links
7322 rechts



Karpalgelenkbandage
7201 links
7202 rechts



Fesselkopfbandage (PR)
7213 vorne
7216 hinten

Tragehinweise:

- Die TSM Bandagen können von Tieren täglich 22 bis 23 Stunden getragen werden. Ein tägliches Reinigen der abgedeckten Körperbereiche ist sehr empfehlenswert.
- Unter den Bandagen ist kein Überhitzen oder Wärmestau, aufgrund der einzigartigen TSM Innenstruktur, zu beobachten.
- Die Bandagen sind bei maximal 40°C mit Feinwaschmittel in der Waschmaschine waschbar